

ONDERSTEUNENDE KNEEBANDAGE



STABILISEERT DE KNEFSCHIJF EN ONTLAST DE KNIJ

ELASTISCH 3D-TRICOT
> Ondersteuning van de knie.

GLIJDT NIET AF
> Elastische siliconen band.

ADEMEND WEEFSEL
> Afvoer van transpiratie.

GEEN ONGEMAK OF IRRITATIE
> Gepatenteerd siliconen kussentje aan de knieholte.

GEEN DRUK
> Decompressieweefsel ter hoogte van de knieschijf.

INDICATIES:

Het dragen van de ondersteunende EPITACT® kniebandage wordt aanbevolen bij matige verrekkingen of letsels aan de knie en kan gebruikt worden als bescherming na een operatie.

CONTRA-INDICATIES:

Niet gebruiken bij arteritis, ernstige spataders, flebitis of oedeem in de benen (lymfatisch/veneus) en/of dijen, om te vermijden dat de bloedcirculatie wordt belemmerd. Niet gebruiken op een huidletsel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Wij raden u aan om de bandage te wassen vóór het eerste gebruik. Om ervoor te zorgen dat de bandage altijd perfect blijft zitten is het belangrijk dat het silicone-oppervlak van de elastische band na elk gebruik met water en zeep wordt schoongemaakt.

Niet gebruiken in rusttoestand (dus enkel wanneer u beweegt). In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts, apotheker of medisch personeel. Dit medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct dat aan de Europese wetgeving is onderworpen en van het CE-label is voorzien. De conformiteitsbeoordeling werd uitgevoerd door ASQUAL.

BIJZONDERE KENMERKEN:

Dankzij het elastisch geweven 3D-tricot oefent de EPITACT® kniebandage een zekere compressie uit waardoor de knie goed ondersteund wordt en de proprioceptie bevordert wordt. Een goede zintuiglijke waarneming van het gewricht draagt immers bij tot de stabiliteit van dat gewricht.

ERGONOMIE:

Dankzij de elastische siliconen band ter hoogte van het dijbeen blijft de bandage goed zitten. Het gepatenteerde kussentje achteraan de knie (aan de knieholte) zorgt ervoor dat de bandage geen ongemak of irritatie veroorzaakt. De knieschijf wordt beschermd tegen druk dankzij een decompressiezone in het textiel en het ademende weefsel zorgt voor een optimale afvoer van transpiratie en voor extra comfort. De ondersteunende EPITACT® kniebandage kan zowel aan de linker- als rechterknie worden gedragen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Wanneer u als sporter na een letsel uw activiteit opnieuw wilt opnemen, dan raden wij u de PHYSIOstrap® Sport aan om uw kwetsbare knie te beschermen.

ONDERHOUD:

Met de hand wassen op 30°C, met een niet-agressieve zeep en zonder reinigings- of bleekmiddel. Goed spoelen. Met de hand uitwringen. Niet blootstellen aan een directe warmtebron (verwarmingstoestel, zonlicht). Geen vlekkenverwijderaar gebruiken.

SAMENSTELLING: 93,6% textiel (polyamide, elastaan, polyester), 6,4% silicone.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt.

De referentietaal is het Frans. Initiële CE-markering: 2017.



Wasbaar met de hand.



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorioi/Drôme - FRANCE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.be

N19452BE-NL-A
01/2018