

ENKELBANDAGE VOOR DE GEWRICHTSBANDEN

ONDERSTEUNT, STABILISEERT EN ONTLAST DE ENKEL



INDICATIES:

Het dragen van de EPITACT® enkelbandage voor de gewrichtsbanden wordt aanbevolen bij lichte tot matige verstuikingen van de buitenste gewrichtsband, het hervatten van fysieke activiteiten na een matige tot ernstige verstuiking, alsook bij de behandeling van postoperatief oedeem.

CONTRA-INDICATIES:

Niet gebruiken in geval van diabetes, polyneuropathie, zenuwaandoeningen aan de onderste ledematen, arteritis. Niet gebruiken op een huidletsel.

VOORZORGEN BIJ GEBRUIK:

Lees aandachtig de informatie in de bijsluiter voordat u de enkelbandage gebruikt. In geval van twijfel, vraag raad aan uw arts, apotheker of medisch personeel. Dit medisch hulpmiddel is een gezondheidsproduct dat aan de Europese wetgeving is onderworpen en van het CE-label is voorzien. De conformiteitsbeoordeling werd uitgevoerd door ASQUAL.

BIJZONDERE KENMERKEN:

Het elastisch geweven 3D-tricot past zich perfect aan het volume van de voet aan en oefent een gelijkmatige druk uit op het gewricht voor een betere zintuiglijke waarneming. De gepatenteerde strapping stabiliseert de enkel en houdt de voet in zijn plaats tijdens alle bewegingen, zonder druk uit te oefenen op de achillespees.

ERGONOMIE:

Dankzij de afneembare band kunt u zelf kiezen hoe strak u de enkelbandage aanhaalt (naargelang oedeem, enz.). De enkelbandage voor de gewrichtsbanden heeft een anatomische vorm, een gesloten hiel

en een specifiek tricot aan de uiteinden dat voor een goede aansluiting zorgt, zonder af te knellen. Het ademend weefsel zorgt voor een optimale afvoer van transpiratie en voor extra comfort. U kunt de EPITACT® enkelbandage zowel aan de linker- als rechterenkel dragen.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Wanneer u als sporter na een letsel uw activiteit opnieuw wilt opnemen, dan raden wij u de ERGOstrap™ Sport aan om uw kwetsbare enkel te beschermen.

ONDERHOUD:

Met de hand wassen op 30°C, met een niet-agressieve zeep en zonder reinigings- of bleekmiddel. Goed spoelen. Met de hand uitwringen. Niet blootstellen aan een directe warmtebron (verwarmingstoestel, zonlicht). Geen vlekkenverwijderaars gebruiken.

SAMENSTELLING: 82,9% textiel (polyamide, elastaan, polyester), 17,1% silicone.

De materialen werden beoordeeld op hun biocompatibiliteit volgens ISO-norm 10993-1. Indien er zich alsnog een probleem zou voordoen, stop dan onmiddellijk met het gebruik en breng MILLET Innovation op de hoogte. Het bedrijf MILLET Innovation kan niet aansprakelijk worden gesteld indien het product niet volgens de aanbevelingen van de fabrikant wordt gebruikt. De referentietaal is het Frans. Initiele CE-markering: 2017.



Wasbaar met de hand.



Niet strijken of stomen.



Geen chemische reiniging.



Geen bleekmiddel gebruiken.



Niet in de droogkast.



Zie verpakking.

Product ontwikkeld door MILLET Innovation.



MILLET Innovation ZA Champgrand
26270 Lorio/Drôme - FRANCE

**MILLET
INNOVATION**

www.epitact.be

NI19451BE-NL-A
01/2018